



ハンフリー自動視野計用
テキストデータ収集システム

IsowDAS for HFA


ご提案資料

(サンプル集)

オリジナルチャート表示ウィンドウ


オリジナルチャート (ズーム100%)

全ての操作がワンクリックで行えます。
患者コードで検査データを検索します。
左右眼の切り替えも簡単行えます。
過去の検査結果の呼び出しもスムーズに行えます。
普通紙への印刷も簡単に行えます。
クリップボードへの転送も簡単に行えます。

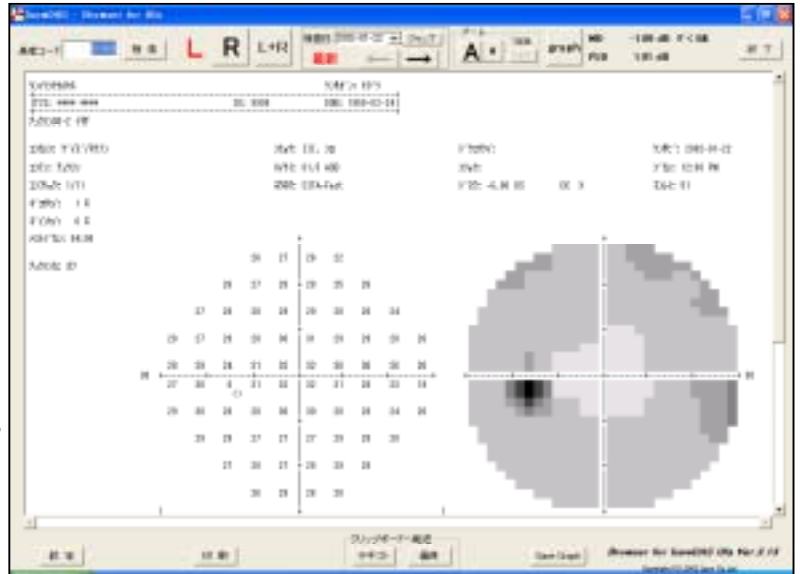


オリジナルチャート拡大表示 (拡大ズーム：100~160%)

見たい部分を簡単に拡大して表示できます。

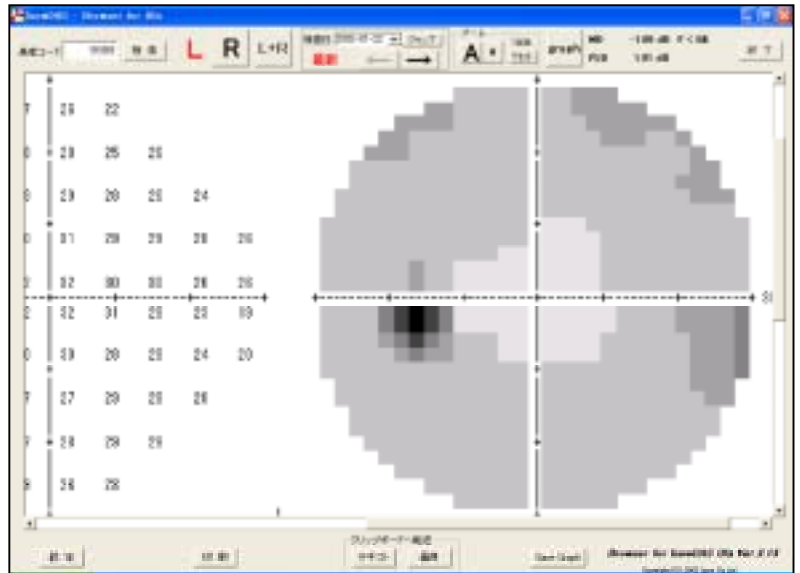

オリジナルチャート縮小表示 (縮小ズーム：100~10%)

縮小してチャートの全体表示も簡単にできます。

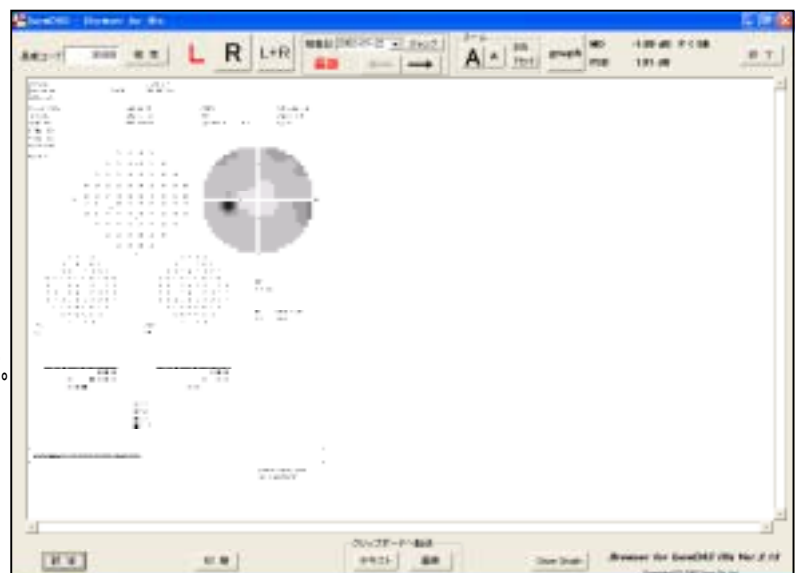


両眼表示ウィンドウ

db、G/Sを両眼並列表示できます。


db、G/Sそしてスーパーインポーズの切り替えもワンクリックで行えます。

過去の検査結果の呼び出しも簡単です。


スーパーインポーズ表示
(G/S + db)

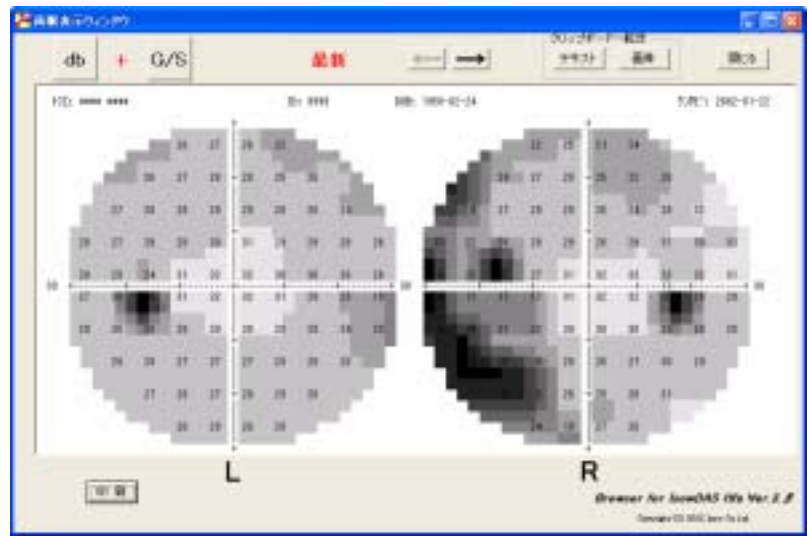

G/S両眼表示

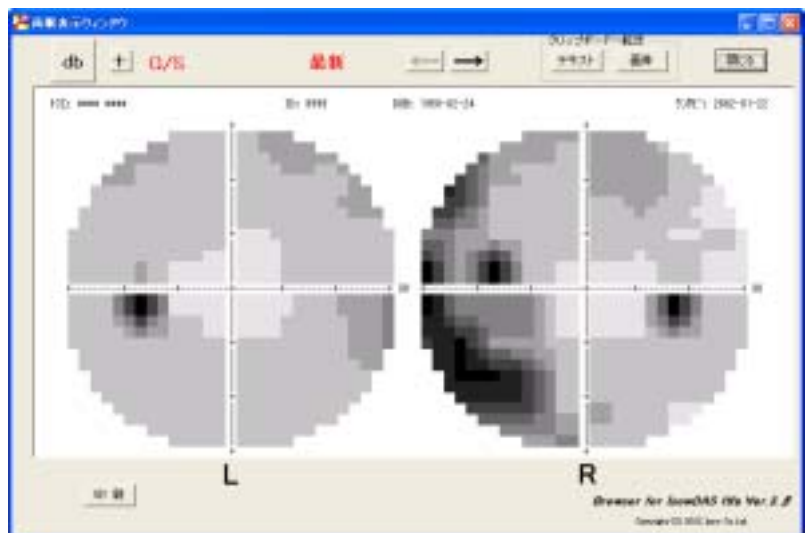


db 両眼表示

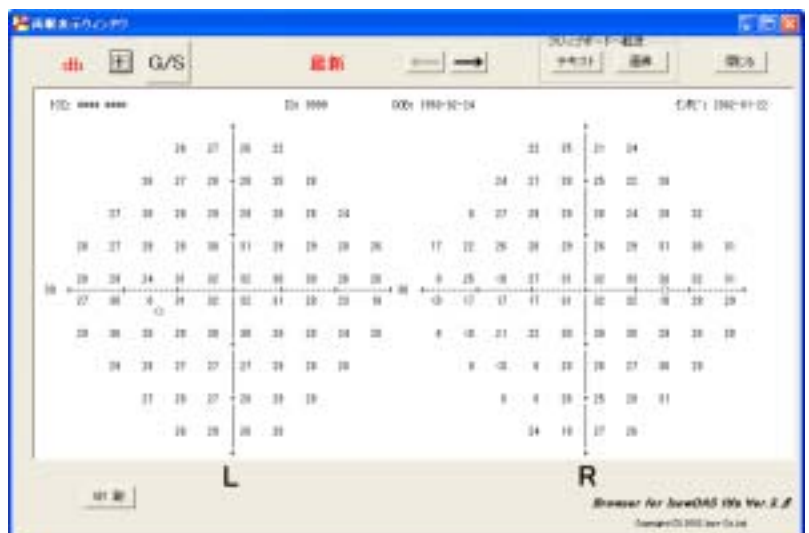


MD値・PSD値グラフ表示ウィンドウ

MD値・PSD値を経時的にグラフ化して表示できます。
両眼同時表示、独立表示の切り替えもワンクリックで行えます。


両眼データ同時表示

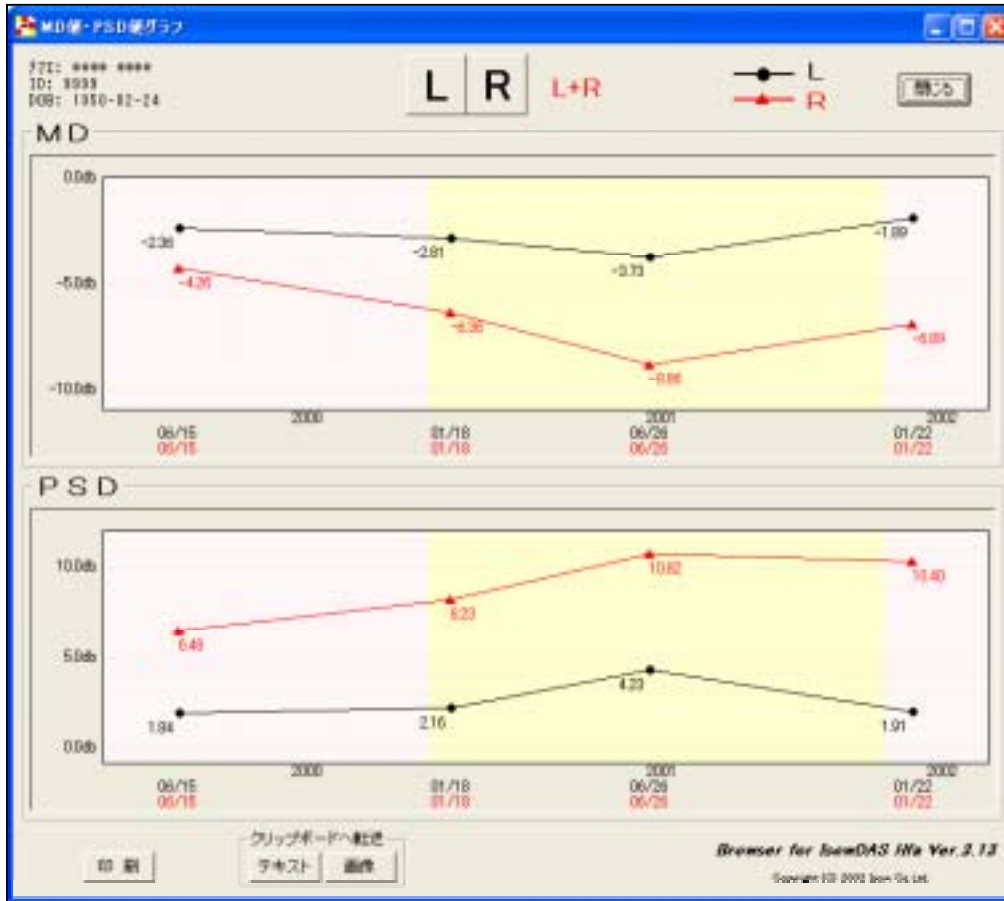

左眼データ表示

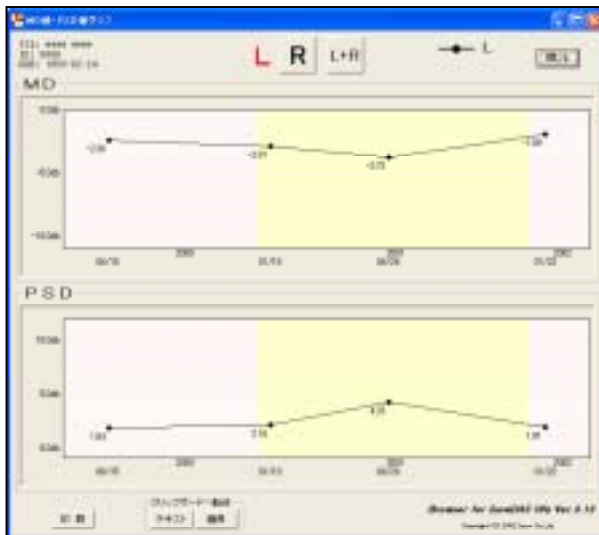


右眼データ表示

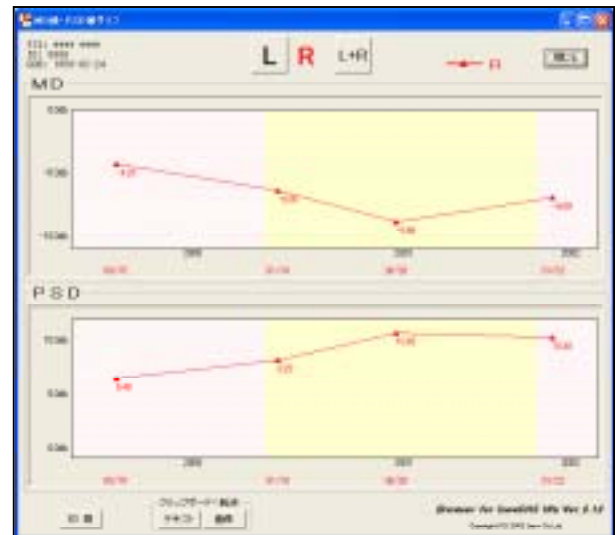

システム構成例


システム構成例 (ネットワーク型 基本構成)

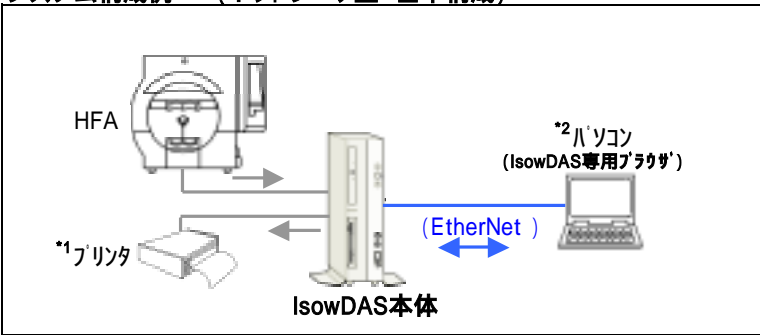

*1 プリンタ
IsowDAS本体に接続するプリンタはHFA標準仕様の感熱紙プリンタ(Printrex)または、Windows対応の市販プリンタが使えます。

*2 IsowDAS専用ブラウザ
IsowDAS専用ブラウザは以下のオペレーティングシステムが正常に作動しているパソコンでお使い頂けます。
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 98 Second Edition
Microsoft Windows Milenium Edition
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows NT 4.0 Workstation
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows XP Professional


システム構成例 (ネットワーク型 無線LAN構成)

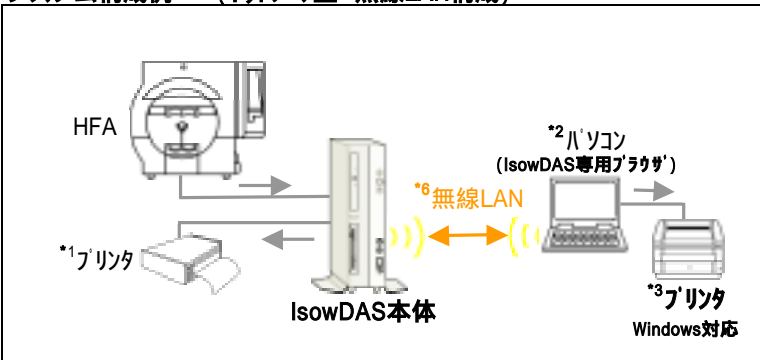

*3 ネットワークプリンタ
ネットワーク上に接続するプリンタはWindows対応の市販プリンタが使用でき、常時印刷出力またはIsowDAS専用ブラウザからの印刷操作での印刷出力が設定できます

*4 IsowDAS専用ブラウザ (IsowDAS本体へインストール)
IsowDAS専用ブラウザソフトはIsowDAS本体にインストールして使用することもできます。
この場合ディスプレイ、マウス、10キ-などを用意する必要があります。


システム構成例 (スタンドアローン構成)

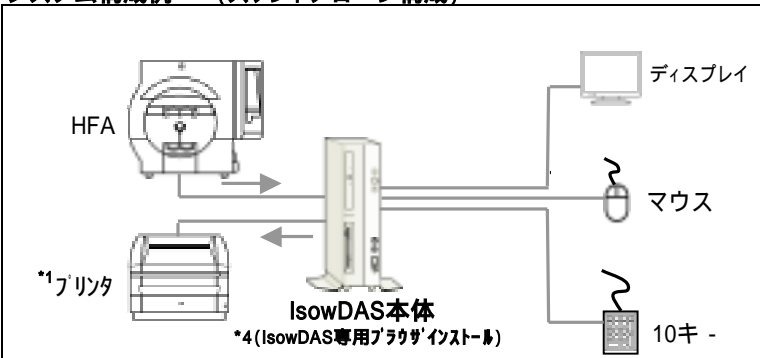

*5 データフォルダ(ネットワーク接続時)
IsowDASのデータフォルダはIsowDAS本体以外のネットワークでつながったサーバや他のパソコンに作る事ができます。
また、画像ファイリングシステムや電子カルテシステム等と連携させる事も可能です。

*6 クライアントPCとの通信は無線LAN仕様も可能です。

システム構成例 (既存ファイリングシステム等との連携構成)

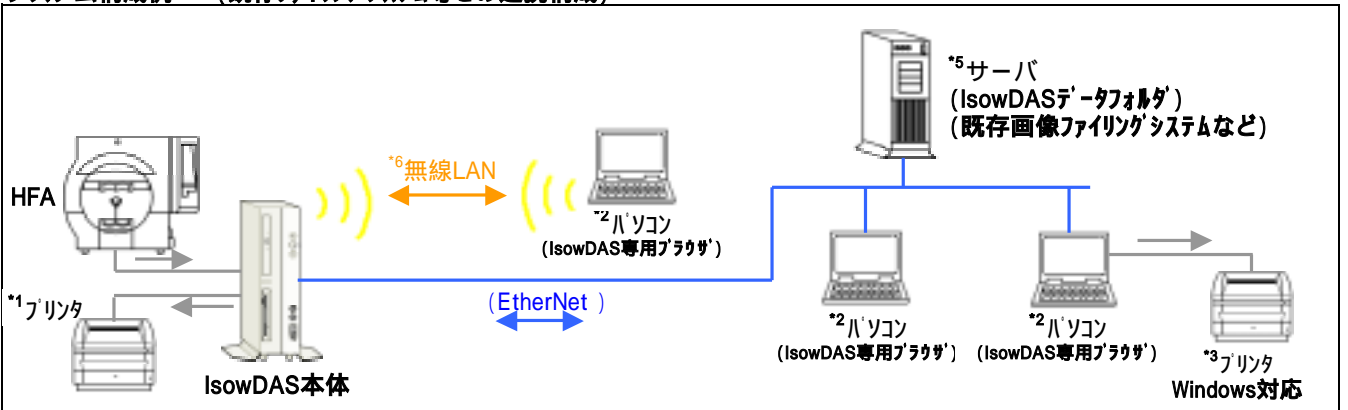

上記の他、様々な構成が可能ですので、担当者にご相談下さい。
上記のシステム構成を実現するには別売オプションが必要な場合があります。



製造発売 **有限会社イソウ**
〒540-0021
大阪市中央区大手通2-4-10
TEL 06-6966-5655
FAX 06-6966-5656
<http://www.isow.co.jp>